


## 直感的な素早い操作を可能とした シンプルデザイン

電源 ON は電源スイッチをスライドし、カートリッジカバーを開くだけです。起動後は音声案内と進捗を表すランプ、操作手順を示すイラストでどなたでも簡単に使用できるよう設計されています。

### 3 STEPS 簡単操作

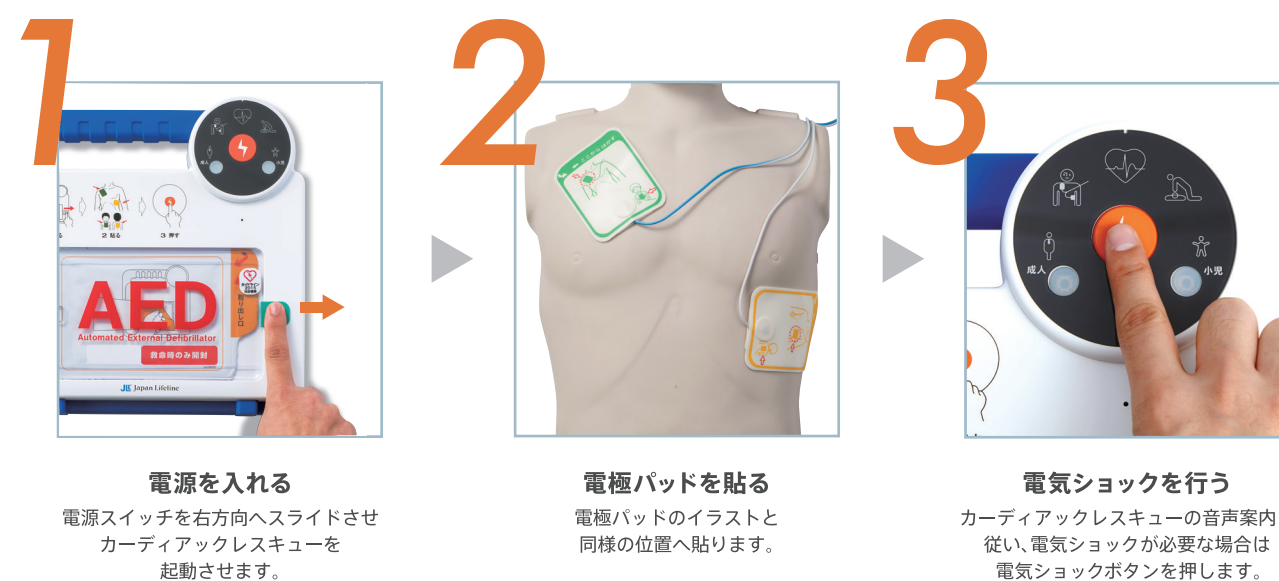


## 心肺蘇生法(CPR)コーチング機能搭載



電気ショック後は必要に応じて心肺蘇生を行います。胸骨圧迫のタイミングを示すピープ音と共に、CPRランプが1分間に110回<sup>\*1</sup>のテンポで点滅します。また次の心電図解析までの残り時間を音声でお知らせします<sup>\*2</sup>。

<sup>\*1</sup>JRC(日本蘇生協議会)蘇生ガイドライン準拠。ガイドラインでは胸骨圧迫のテンポを1分間に100回から120回と規定しています。  
<sup>\*2</sup>心電図解析は2分間に行われます。

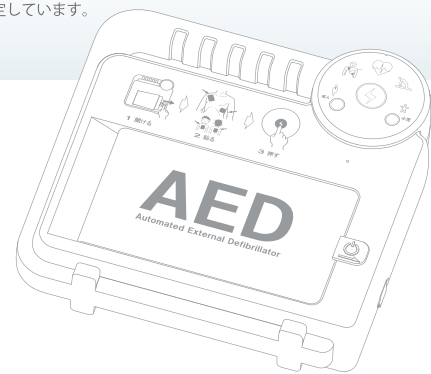

直ちに胸骨圧迫を始めてください

音にあわせて胸骨圧迫をしてください

できるなら人工呼吸も行ってください

## 製品仕様

カーディアックレスキュー RQ-6000	
モデル番号	RQ-6000
標準セット	本体+パッドカートリッジ1個
標準セット付属品	救急6点セット、キャリングバッグカーディアックレスキュー用、データマネジメントソフト用CD、AED設置ステッカー、取扱説明書、書籍一式(保証書等)、表示タグ、添付文書、カーディアックレスキュー操作説明DVD
出力エネルギー	成人:180J 小児:50J(負荷抵抗50Ω)
出力波形	二相性波形
基本動作	心電図を解析し、除細動が必要かどうかを識別。必要な場合、除細動エネルギーが充電され、電気ショックを行う準備が整うと、使用者に通知。
耐用期間	6年6ヶ月
保証期間	設置後5年

寸法/重量	
寸法	300×298×69mm(幅×奥行×高さ)
重量	2.1kg(パッドカートリッジを含む)

セルフテスト機能	
自動セルフテスト/手動セルフテスト	電極パッド異常有無、バッテリー残量異常有無、本体異常有無、電極パッドの保水チェック

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の使用期限などを日ごろから点検することが重要です。

環境要件	
塵埃/液体の浸入に対する保護	IP55
動作温度	0~40℃
保管温度	0~50℃
湿度	相対湿度10~95%、結露なし
気圧	570hPa ~ 1030hPa
耐落下	1.5m

データ記録/読取	
データ記録	心電図、電気ショック出力回数、本品使用中の周囲音、自動および手動セルフテスト実行時刻および結果
データ読取	Bluetooth またはUSBケーブルを介し保存しているデータをパソコンで読取可能 ※付属専用ソフトが必要

パッドカートリッジ	
モデル番号	RQ-PC101/RQ-PC201
電池の規格、容量	非充電式リチウムバッテリー、DC1.2V/2800mAh(二酸化マンガンリチウム電池)
パッドの規格、特徴	成人・小児兼用パッド、パッド/バッテリー一体型
使用期限	製造から30ヶ月 ※パッドカートリッジのアルミ包装及びフィルムに表記

### インジケータ



### 表示タグ



カーディアックレスキューの設置者及び管理者は、品質確保及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。

- ・AEDは高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器です。
- ・ご使用前に取扱説明書、添付文書および注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・パッドカートリッジには使用期限があるため、「表示タグ」を本体またはキャリングバッグ等の見やすい位置に取り付けて、交換時期の確認、及び期限内の交換を確実に実施してください。
- ・パッドカートリッジは、再使用禁止です。
- ・カーディアックレスキューに不測の事態が発生した場合や、廃棄時、設置場所が変更になった時には、販売店または製造販売業者まで速やかにご連絡ください。また、譲渡は原則できませんが、譲渡される場合は事前に販売店または製造販売業者までご連絡ください。

**使用上の考慮事項** 操作手順ごとに音声による指示がなされるため、緊急時の救命処置の一部として使用できます。そのため本品を操作する救命者は、心肺蘇生法(CPR)とAEDの使用法を含めた一次救命処置のトレーニングを受講することを推奨します。

日本ライフライン株式会社  
AEDコールセンター ☎ 0120-001-332

製品ホームページ [www.aed-rescue.com](http://www.aed-rescue.com)



販売名:カーディアックレスキュー RQ-5000  
一般的名称:半自動除細動器  
医療機器承認番号:22600BZX00521000

製造販売業者  
日本ライフライン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番20号  
AED事業推進部 TEL. 03-6711-5268  
<http://www.jll.co.jp>  
東証一部上場(証券コード:7575)

2019-04-50-01-s00901



自動体外式除細動器

**Cardiac ResQ**  
カーディアックレスキュー RQ-6000

**AEDで救えるいのちがある**

JLL Japan Lifeline